

# 業界初のタブレット型 酵素系洗浄剤

医療分野の血液・蛋白等で汚染された医療器具類洗浄のために開発されたタブレット型酵素系洗浄剤です。蛋白分解酵素配合のため、特に凝固した血液、蛋白の除去に優れた洗浄力を発揮します。

医療器具用タブレット型酵素系洗浄剤

# アルバスト TA

■発泡タイプ■ 80錠×4箱／ケース

## 特長

- 中性ですので酸・アルカリに弱い材質の洗浄にも適しています。また、排水時のpH規制もうけません。
- 金属腐食性が非常に少なく、器具等を傷めません。
- アルミ個包装により酵素安定性が良く、保存性に優れています。

## 成分

蛋白分解酵素（プロテアーゼ）、界面活性剤、有機酸、無機塩

## 性状

外観：極薄い褐色タブレット  
pH：6～8



# 医療器具用タブレット型酵素系洗浄剤 アルバストTA

## 用途および使用方法


### 汚染の軽い場合

- 血液、体液、組織、脂肪、炭水化物、シミ等の付着した医療器具類

### 汚染のひどい場合

- 血液、体液、組織、脂肪、炭水化物、シミ等の付着した医療器具類
- チューブ類、内視鏡

### 浸漬

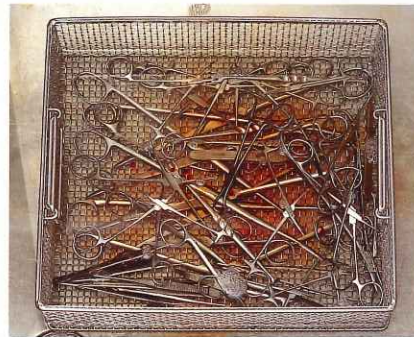

#### ■使用方法

洗浄最適温度 40℃の溶液に浸漬後すぐ。

※汚染のひどい場合は24時間放置後すぐ。  
(酵素力価が減少するため、65℃以上での使用は不可)

#### ■使用濃度

0.09%溶液  
(水5Lに対して1錠)

### すすぎ

### 本洗浄 超音波洗浄機など



#### ■使用方法

洗浄最適温度 40℃溶液にて通常洗浄。  
(酵素力価が減少するため、65℃以上での使用は不可)

#### ■使用濃度

0.09%溶液  
(水10Lに対して2錠)  
※グルタール製剤使用にともなう凝固した血液は洗浄できません。

医療器具は防錆処理を行って下さい。

水溶性防錆潤滑剤

**アルバストML** 使用

※ご使用前には必ず「使用上の注意」をお読み下さい。

## 株式会社アルボース

[URL] <http://www.arbos.co.jp/>

本社	〒565-0862 大阪府吹田市津雲台7-4-D126-101	TEL.06-6831-0909
東京支店	〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-8栄泉岩本町ビル6F	TEL.03-3863-6641
名古屋支店	〒451-0043 名古屋市西区新道1-21-13	TEL.052-533-8008
大阪支店	〒565-0862 大阪府吹田市津雲台7-4-D126-101	TEL.06-6831-0831
滋賀工場	〒520-3211 滋賀県甲賀郡甲西町高松町8-1	TEL.0748-75-1282

(営業所)

札幌	TEL.011-695-6641	仙台	TEL.022-213-1288	大宮	TEL.048-658-5061
横浜	TEL.045-471-3551	静岡	TEL.054-280-5551	京滋	TEL.0748-75-1281
岡山	TEL.086-272-5524	広島	TEL.082-506-4488	九州	TEL.092-891-8841

●お問い合わせは